
Naudojimo instrukcija





Prieš balinimą ir jo metu, dantis valykite Enlighten Serum dantų pasta.



Atidarykite Evo4 rinkinį.



Išsimkite kapas.



Paimkite pirmos savaitės švirkštą Nr. 1



Atsukite švirkšto kamštelį.



Uždėkite aplikatoriaus antgalį.



Nuimkite aplikatoriaus kamštuką. Jo neišmeskite. Juo uždarysite po naudojimo.



Užpildykite abi kapas nedideliu (lėšio dydžio) gelio kiekiu kiekvienam dančiui skirtoje vietoje.



Uždėkite kapas ant dantų.



Pirmiausia įspauskite
kapas ties dantų galine
puse.



Tuomet prispauskite
kapas prie priekinių
dantų.



Nuvalykite perteklinį gelį
servetėle. Dabar galite eiti
miegoti.



Ryte kapas išskalaukite tik šaltu vandeniu ir sudėkite į dėklą nukreiptas žemyn, kad išbėgtų vanduo ir jį išdžiūtų iki kito naudojimo.



Jei odontologas nenurodė kitaip, atlikite procedūrą:


- 1 savaitė – kiekvieną naktį (per naktį)
- 2 savaitė – kiekvieną naktį (per naktį)
- 3 savaitė – kiekvieną dieną 7 dienas, po 1 valandą per dieną



Po kiekvieno kasdienio balinimo, išsivalykite dantis „Enlighten Serum“ pasta. Tuomet naudokite „Enlighten Comfort“ pieštuką.



Pasukite pieštuko galą,
kad ištekėtų gelis.

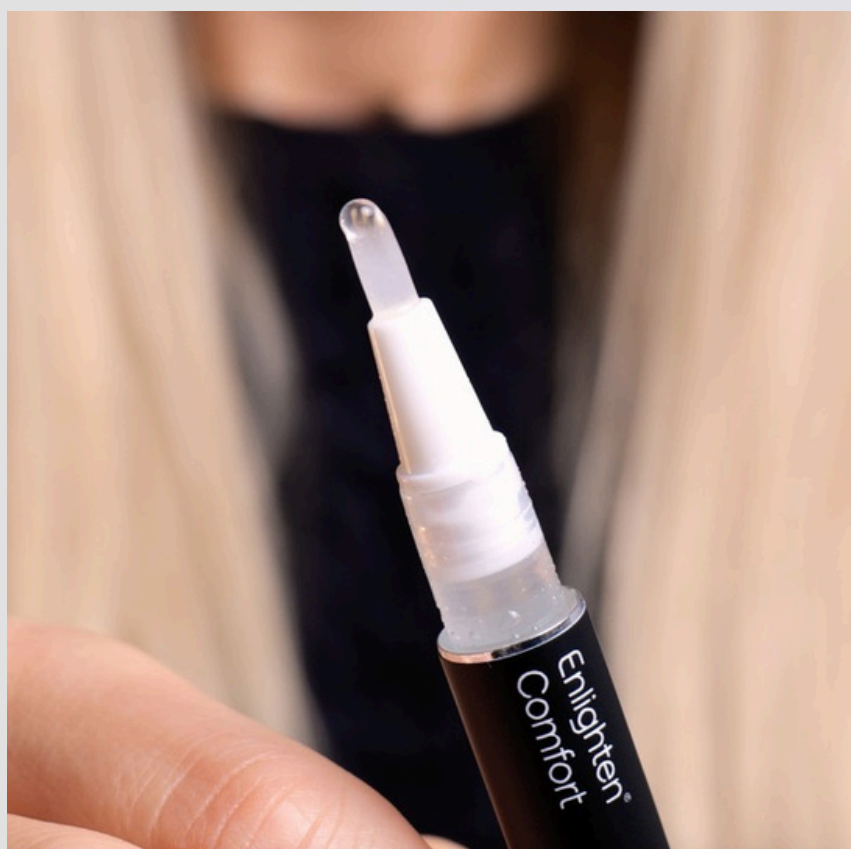

Užtepkite tiek gelio, kad
būtų padengti tiek
viršutiniai, tiek apatiniai
dantys.



Patraukite lūpas nuo
dantenų.



Gelį tepkite ant dantų dalies, esančios arčiausiai dantenų. Prioritetas – apatiniai priekiniai dantys.



Leiskite geliui džiūti 30 sekundžių prieš užveriant burną.



Baigę 3 savaitių balinimo kursą, į savo kasdienę rutiną įtraukite „Enlighten White“ dantų pastą.